



OCUTEARS  
OCUTEARS  
OCUTEARS  
OCUTEARS  
OCUTEARS  
OCUTEARS  
OCUTEARS

## Használati utasítás

Tartósítószer-mentes szemcsepp

### Mi az Ocutears® Alo+ és milyen problémák esetén alkalmazható?

Az Ocutears® Alo+, melynek fő összetevői a keresztkötött hialuronsav (0,2%) és az Aloe vera (0,1%), a szemszárazság tüneteinek és a szemben jelentkező kellemetlen érzés kezelésére, valamint a szaruhártya védelmére szolgál.

**A keresztkötött hialuronsav** a terméknek nagyfokú hidratáló képességet és tartós szemfelszíni jelenlétet biztosító magas viszkoeaszticitást kölcsönöz, melynek köszönhetően a termék a szemszárazság tüneteinek hosszan tartó enyhülését nyújtja.

Az **Aloe Vera** hidratáló, vérbőséget csökkentő és síkosító tulajdonságairól ismert, amelyek fokozzák a szemcsepp nedvesítő hatását, ezáltal kényelmesebbé teszik a látást és meghosszabbítják a frissesség érzését. Az Aloe Vera erős hidratáló és hosszan tartó védőhatásának köszönhetően szemvörösség vagy különösen érzékeny szemek esetén is hasznosnak bizonyult.

### Az Ocutears® Alo+ a következő esetekben javallott:

- környezeti tényezők vagy gyógyszerek okozta szemszárazság tüneteinek, irritáció és szemvörösség enyhítésére.
- a szem lubrikálására és a komfortérzet javítására kontaktlencse használatkor

### Az Ocutears® Alo+ használata hasznos a következők ideje alatt és után:

- hosszan tartó napsugárzásnak kitéve;
- légkondicionáló használata;
- digitális képernyők (monitor, telefon) tartós használata;

Az Ocutears® Alo+ enyhítheti a szemműtét után jelentkező kellemetlen szemanaszokat.

### Hogyan kell az Ocutears® Alo+-t használni?

Cseppentsen a szemeibe 1–2 cseppet naponta egyszer vagy többször, vagy a kezelőorvosa/gyógyszerésze által javasolt gyakorisággal.

A palack kinyitása előtt mosson kezet, és ügyeljen a higiéniára a használat során.

Palack:

1) Az első használatot megelőzően a dezsmazárat húzva távolítsa el azt teljesen.	
2) A palackot finoman nyomva cseppentsen 1 cseppet a szemébe.	
3) Zárja vissza szorosan a palackot használat után.	

Egyadagos tartály:

1) Az egyadagos tartályokból álló szettből tépje le egyet.	
2) A kupak elfordításával nyissa ki a tartályt.	
3) A tartályt finoman nyomva cseppentsen 1 cseppet a szemébe.	
4) A tartályban maradt terméket a használatot követően dobja ki.	

**Santen**

A betegájékoztató felülvizsgálatának dátuma  
2021. március.

### A termék első alkalmazása előtt figyelmesen olvassa végig a teljes betegájékoztatót.

Őrizze meg a betegájékoztatót; a későbbiekben még szüksége lehet rá, hogy újra elolvassa.

Ha bármilyen további kérdése lenne, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ha a tünetek továbbra is fennállnak, vagy Önénél bármilyen mellékhatás jelentkezik, keresse fel kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

### Figyelmeztetések:

- Ne használja a terméket, ha allergiás vagy túlérzékeny annak bármely összetevőjére.
- Súlyos szaruhártya betegség esetén használat előtt beszéljen orvosával.
- A palackot a felbontástól számított 90 napon belül használja fel; az egyadagos tartályt felbontás követően azonnal fel kell használni és használat után ki kell dobni.
- Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl.
- Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült.
- Hőtől, napfénytől, nedvességtől óvando, gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ne nyelje le a folyadékot.
- Ügyeljen rá, hogy a csepegtető csúcsa ne érintkezzen a szemmel.
- Tárolás 25 °C alatt. Ne fagyassza le.

### Az Ocutears® Alo+ összetevői:

Keresztkötött hialuronsav 0,2%, Aloe Vera gél 0,1%, dinátrium-tetraborát-dekahidrát, bórsav, nátrium-klorid, víz injekcióhoz.

### Kiszerezések:

10 ml-es palack (többadagos, tartósítószer-mentes),  
0,35 ml x 15 egyadagos tartály,  
0,35 ml x 5 egyadagos tartály (ingyenes minta)

Bővebb információért, kérjük, beszéljen kezelőorvosával vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Santen irodával a következő címen:  
[www.santenhungary.hu/](http://www.santenhungary.hu/)



OFFHEALTH S.p.A.,  
Via Giovanni Paisiello 10,  
50144 Firenze, Olaszország

Gyártási idő	Gyártó	25 °C alatti hőmérsékleten tárolandó.	Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.	Aszeptikus gyártási technológiával sterilizálva.	Gyártási tétel kódja	Lejárati idő	Olvassa el a használati utasítást!	Újra felhasználni tilos!	Ne használja, ha a csomagolás sérült.	Szárazon tartandó!



MARVACO OY  
PELTOTIE 20,  
FIN-28400 ULVILA, FINLAND  
repro@marvaco.fi  
marvaco.fi • marvaco.se

09.04.2021

Proof No. 8

**Santen**

Part No: 4220-01

**Leaflet Ocutears Alo+**

Item No: 017512, 017558

Dimensions: 130x360 mm

Fonts/Size:  
Helvetica Neue 7-16 pt

Country: HU

Component code:  
017599

Colors:



Black



Technical

PLEASE, CHECK THE SPOT COLORS FROM PANTONE® COLOR GUIDE.